

HISTORIA & DESARROLLO

DROGAS Y MEDICINAS → EFECTOS EN SNC

Dräger

Estimulantes

- **Cocaína**
- **Anfetamina,**
- **Metanfetamina** → MDMA („Extasis“, „Adam“), MDE („Eve“)

Sedantes

- **Opiáceos y Opioides** → Heroína, Codeína, DHC, Metadona
- **Benzodiazepinas** → Rohypnol® (Flunitrazepam), Valium® (Diazepam)

- **Cannabis** → Hachis, Marihuana

Alucinógenos

- **LSD, Psilocybine, Mescalina, fenciclidina (PCP)**

Dräger. Technik für das Leben.

Dräger DrugTest® 5000 Cut Off. Valores límite

Dräger

Concentraciones del valor límite (Cut-Off) del Dräger DrugTest 5000

Droga		Calibrador	ng/mL
COC	Cocaína	Cocaína	20
OPI	Opiáceos	Morfina	20
BENZO	Benzodiazepina	Diazepam	15
THC	Delta 9 Tetrahidrocanabinol	Delta-9-THC	5
AMF	Anfetamina	D-Anfetamina	50
MAMF	Metanfetamina	D-Metanfetamina	35

34 | 37 Dräger DrugTest®5000 – Luis Botija | 19.12.2011

Valores pasados los cuales, la muestra da positivo.

- La duración en saliva, para las distintas sustancias, es la siguiente.
- Estimulantes (cocaína, anfetaminas, metanfetaminas): De uno a tres días.
- Sedantes/Depresores (opiáceos, heroína, codeína, metadona, Valium, Diazepam): De 1 a 3 días.
- Alucinógenos: (Cannabis, hachís, marihuana, LSD, mescalina): 24 horas.